



Aurum convex
met **Manuka Honing**



Veelzijdige probleemoplosser voor een lekvrije hechting

1-delig Aurum[®] Convex

Ileostomie



- ✓ Met Manuka honing
- ✓ Inclusief geïntegreerde oogjes (voor het dragen van een gordel)
- ✓ Voorzien van kijkvenster
- ✓ Dual-Carb[®]i filter heeft een groot oppervlak van het koolstoffilter, dat ervoor zorgt dat de lucht vrij kan stromen door het filter en geurtjes worden geëlimineerd. Het PTFE-membraan stoot vloeibare en olieachtige stoffen af om de kans op lekkage te verkleinen
- ✓ Gemakkelijk en gecontroleerd legen met een lipje
- ✓ Easy2peel[™] tab voor eenvoudig verwijderen van de huidplaat



Productomschrijving

Verkrijgbaar in 4 Convex plateaumaten

PLATEAUMAAT Small (13 mm t/m 25 mm)

Verkrijgbaar in de volgende maten zakjes:



Mini

Midi

Maxi

PLATEAUMAAT Medium (13 mm t/m 35 mm)

Verkrijgbaar in de volgende maten zakjes:



Mini

Midi

Maxi

PLATEAUMAAT Large (13 mm t/m 48 mm)

Verkrijgbaar in de volgende maten zakjes:



Midi

Maxi

PLATEAUMAAT Xlarge (13 mm t/m 60 mm)

Verkrijgbaar in de volgende maten zakjes:



Midi+

Maxi+

i Verschillende uitknipbare varianten ook in transparante uitvoering.



Extra informatie



Lees voor gebruik eerst de gebruiksaanwijzing van de fabrikant



Ileostomie 1-delig / Convex / Manuka honing

1



Indicatie

Stoma trekt zich regelmatig terug tot op of onder huidniveau.

2



Vorbereiden

Zorg ervoor dat alle benodigde materialen klaarliggen, zoals een mal, een schaar, een pen, vochtige en droge gazen en stomamateriaal.

3



Knip indien nodig de huidplaat op maat.

4



Verwarm de huidplaat indien nodig door deze bijvoorbeeld onder de kleding te houden.

5



Verwijderen en schoonmaken

Ondersteun de huid en duw de huid los van de huidplaat met een vochtig gaasje.

6



Reinig de huid en de stoma met lauw water en dep deze daarna droog.

7



Aanbrengen

Verwijder de folie aan de achterzijde van de huidplaat.

8



Breng de huidplaat aan over de stoma op de huid en houd hierbij indien nodig de huid gestrekt. Let op dat de sluiting van het zakje gesloten is (Rol de sluiting van het zakje op tot aan het klittenband en wrijf het aan).

9



Breng vervolgens de gehele huidplaat aan op de huid.

10



Wrijf de huidplaat zorgvuldig aan op de huid, te beginnen rondom de stoma naar de buitenranden.

11



Via het kijkvenster kan eventueel gecontroleerd worden of het stoma-zakje goed op zijn plaats zit.

12



Tip
Indien de geïntegreerde oogjes (voor het dragen van een gordel) niet nodig zijn, knip deze dan af voor het aanbrengen.

Ileostomie 1-delig / Convex / Manuka honing

Product	Maat	Per doos	Mini Beige	Midi Beige	Maxi Beige
Aurum Convex plateau Small	13 mm	10	MHNSD413 (tot 25 mm)	MHNSD513 (tot 25 mm)	MHNSD913 (tot 25 mm)
	19 mm	10	-	MHNSD519	MHNSD919
	22 mm	10	-	MHNSD522	MHNSD922
	25 mm	10	-	MHNSD525	MHNSD925
	Maat	Per doos	Mini Trans	Midi Trans	Maxi Trans
	13 mm	10	MHNSD613 (tot 25 mm)	MHNSD713 (tot 25 mm)	MHNSD313 (tot 25 mm)
Product	Maat	Per doos	Mini Beige	Midi Beige	Maxi Beige
Aurum Convex plateau Medium	13 mm	10	MHNSM413 (tot 35 mm)	MHNSM513 (tot 35 mm)	MHNSM913 (tot 35 mm)
	19 mm	10	-	MHNSM519	MHNSM919
	22 mm	10	-	MHNSM522	MHNSM922
	25 mm	10	-	MHNSM525	MHNSM925
	29 mm	10	-	MHNSM529	MHNSM929
	32 mm	10	-	MHNSM532	MHNSM932
	35 mm	10	-	MHNSM535	MHNSM935
	Maat	Per doos	Mini Trans	Midi Trans	Maxi Trans
	13 mm	10	MHNSM613 (tot 35 mm)	MHNSM713 (tot 35 mm)	MHNSM313 (tot 35 mm)

Product	Maat	Per doos	Mini Beige	Midi Beige	Maxi Beige
Aurum Convex plateau Large	13 mm	10	-	MHNDL513 (tot 48 mm)	MHNDL913 (tot 48 mm)
	32 mm	10	-	MHNDL532	MHNDL932
	35 mm	10	-	MHNDL535	MHNDL935
	38 mm	10	-	MHNDL538	MHNDL938
	44 mm	10	-	MHNDL544	MHNDL944
	Maat	Per doos	Mini Trans	Midi Trans	Maxi Trans
	13 mm	10	-	MHNDL713 (tot 48 mm)	MHNDL313 (tot 48 mm)
Product	Maat	Per doos	Mini Beige	Midi+ Beige	Maxi+ Beige
Aurum Convex plateau Xlarge	13 mm	10	-	MHNDX813 (tot 60 mm)	MHNDX213 (tot 60 mm)
	Maat	Per doos	Mini Trans	Midi+ Trans	Maxi+ Trans
	13 mm	10	-	MHNDX113 (tot 60 mm)	MHNDX013 (tot 60 mm)

M Manuka - **H** Honing - **N** Convex - **D** Drainable - **L** Large (plateaumaat) -
5 Midi Beige (maat zakje en kleur) - **13** 13 mm (stansmaat)



Product	Per doos	Art. code
Gordel standaard 120 cm	10	XBLTS01
Gordel lang 145 cm	10	XBLTL01



ISS01/202110