



Aurum[®] Convex Colostomie

1-delig



Aurum convex
met Manuka Honing




Veelzijdige probleemoplosser voor een lekvrije hechting

1-delig Aurum® Convex

Colostomie



- ✓ Met Manuka honing
- ✓ Inclusief geïntegreerde oogjes (voor het dragen van een gordel)
- ✓ Voorzien van kijkvenster
- ✓ Het Dual-Carb® 2 is een speciaal samengesteld koolstoffilter, ontworpen om geur te absorberen en gas door het filter te laten stromen om kans op ballooning te verkleinen
- ✓ Easy2peel™ tab voor eenvoudig verwijderen van de huidplaat

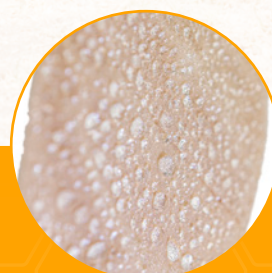


Productomschrijving

Verkrijgbaar in 4 Convex plateaumaten

PLATEAUMAAT Small (13 mm t/m 25 mm)

Verkrijgbaar in de volgende maten zakjes:

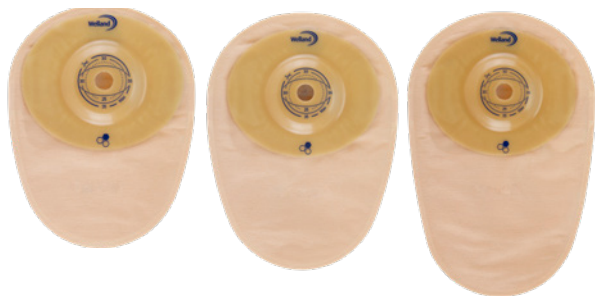


Mini

Midi

Maxi

PLATEAUMAAT Medium (13 mm t/m 35 mm)

Verkrijgbaar in de volgende maten zakjes:

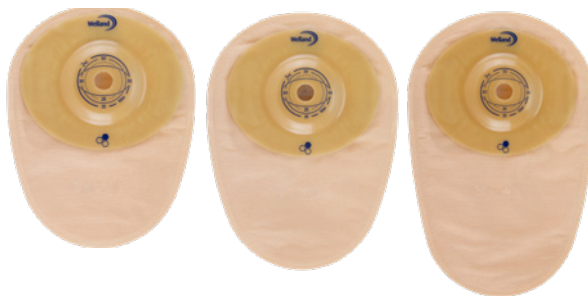


Mini

Midi

Maxi

PLATEAUMAAT Large (13 mm t/m 48 mm)

Verkrijgbaar in de volgende maten zakjes:

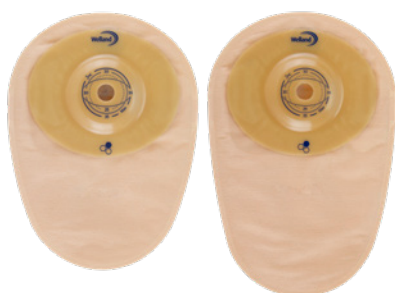


Midi

Maxi

PLATEAUMAAT Xlarge (13 mm t/m 60 mm)

Verkrijgbaar in de volgende maten zakjes:

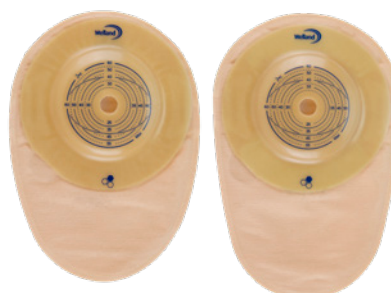

Midi+

Maxi+

i Verschillende uitknipbare varianten ook in transparante uitvoering.



Extra informatie



Lees voor gebruik eerst de gebruiksaanwijzing van de fabrikant



Colostomie 1-delig / Convex / Manuka honing

1



Indicatie

Stoma trekt zich regelmatig terug tot op of onder huidniveau.

2



Vorbereiden

Zorg ervoor dat alle benodigde materialen klaarliggen, zoals een mal, een schaar, een pen, vochtige en droge gazen en stomamateriaal.

3



Knip indien nodig de huidplaat op maat.

4



Verwarm de huidplaat indien nodig door deze bijvoorbeeld onder de kleding te houden.

5



Verwijderen en schoonmaken

Ondersteun de huid en duw de huid los van de huidplaat met een vochtig gaasje.

6



Reinig de huid en de stoma met lauw water en dep deze daarna droog.


7



Aanbrengen

Verwijder de folie aan de achterzijde van de huidplaat.

8

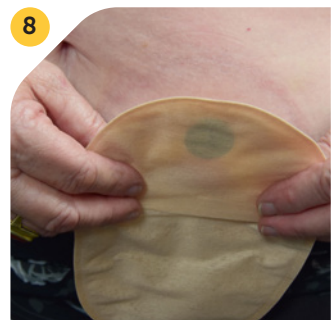

Breng de huidplaat aan over de stoma op de huid en houd hierbij de huid indien nodig gestrekt.

9



Breng vervolgens de gehele huidplaat aan op de huid.

10



Wrijf de huidplaat zorgvuldig aan op de huid, te beginnen rondom de stoma naar de buitenranden.

11



Via het kijkvenster kan eventueel gecontroleerd worden of het stomazakje goed op zijn plaats zit.

12



Tip
Indien de geïntegreerde oogjes (voor het dragen van een gordel) niet nodig zijn, knip deze dan af voor het aanbrengen.

Colostomie 1-delig / Convex / Manuka honing

Product	Maat	Per doos	Mini Beige	Midi Beige	Maxi Beige
Aurum Convex plateau Small	13 mm	10	MHNCS413 (tot 25 mm)	MHNCS513 (tot 25 mm)	MHNCS913 (tot 25 mm)
	19 mm	10	-	MHNCS519	MHNCS919
	22 mm	10	-	MHNCS522	MHNCS922
	25 mm	10	-	MHNCS525	MHNCS925
	Maat	Per doos	Mini Trans	Midi Trans	Maxi Trans
	13 mm	10	MHNCS613 (tot 25 mm)	MHNCS713 (tot 25 mm)	MHNCS313 (tot 25 mm)
Product	Maat	Per doos	Mini Beige	Midi Beige	Maxi Beige
Aurum Convex plateau Medium	13 mm	10	MHNCM413 (tot 35 mm)	MHNCM513 (tot 35 mm)	MHNCM913 (tot 35 mm)
	19 mm	10	-	MHNCM519	MHNCM919
	22 mm	10	-	MHNCM522	MHNCM922
	25 mm	10	-	MHNCM525	MHNCM925
	29 mm	10	-	MHNCM529	MHNCM929
	32 mm	10	-	MHNCM532	MHNCM932
	35 mm	10	-	MHNCM535	MHNCM935
	Maat	Per doos	Mini Trans	Midi Trans	Maxi Trans
	13 mm	10	MHNCM613 (tot 35 mm)	MHNCM713 (tot 35 mm)	MHNCM313 (tot 35 mm)

Product	Maat	Per doos	Mini Beige	Midi Beige	Maxi Beige
Aurum Convex plateau Large	13 mm	10	-	MHNCL513 (tot 48 mm)	MHNCL913 (tot 48 mm)
	32 mm	10	-	MHNCL532	MHNCL932
	35 mm	10	-	MHNCL535	MHNCL935
	38 mm	10	-	MHNCL538	MHNCL938
	44 mm	10	-	MHNCL544	MHNCL944
	Maat	Per doos	Mini Trans	Midi Trans	Maxi Trans
	13 mm	10	-	MHNCL713 (tot 48 mm)	MHNCL313 (tot 48 mm)
Product	Maat	Per doos	Mini Beige	Midi+ Beige	Maxi+ Beige
Aurum Convex plateau Xlarge	13 mm	10	-	MHNCX813 (tot 60 mm)	MHNCX213 (tot 60 mm)
	Maat	Per doos	Mini Trans	Midi+ Trans	Maxi+ Trans
	13 mm	10	-	MHNCX113 (tot 60 mm)	MHNCX013 (tot 60 mm)

M Manuka - **H** Honing - **N** Convex - **C** Closed - **L** Large (plateaumaat) -
5 Midi Beige (maat zakje en kleur) - **13** 13 mm (stansmaat)



Product	Per doos	Art. code
Gordel standaard 120 cm	10	XBLTS01
Gordel lang 145 cm	10	XBLTL01



ISS01/202110