



Aurum Profile
met **Manuka Honing**



**Veelzijdige probleemoplosser bij oneffenheden
en parastomale hernia's**

1-delig Aurum® Profile

Ileostomie



- ✓ Met Manuka honing
- ✓ Inclusief geïntegreerde oogjes (voor het dragen van een gordel)
- ✓ Voorzien van een kijkvenster
- ✓ Dual-Carb®i filter heeft een groot oppervlak van het koolstoffilter, dat ervoor zorgt dat de lucht vrij kan stromen door het filter en geurtjes worden geëlimineerd. Het PTFE-membraan stoot vloeibare en olieachtige stoffen af om de kans op lekkage te verkleinen
- ✓ Gemakkelijk en gecontroleerd legen met een lipje
- ✓ Easy2peel™ tab voor eenvoudig verwijderen van de huidplaat
- ✓ Snel drogend en waterafstotend tissue



Productomschrijving

Verkrijgbaar in 4 plateaumaten

PLATEAUMAAT Small (13 mm t/m 25 mm)

Verkrijgbaar in de volgende maten zakjes:



Mini

Midi

Maxi

PLATEAUMAAT Medium (13 mm t/m 35 mm)

Verkrijgbaar in de volgende maten zakjes:



Mini

Midi

Maxi

PLATEAUMAAT Large (13 mm t/m 48 mm)

Verkrijgbaar in de volgende maten zakjes:



Midi

Maxi

PLATEAUMAAT Xlarge (13 mm t/m 60 mm)

Verkrijgbaar in de volgende maten zakjes:



Midi+

Maxi+

i Verschillende uitknipbare varianten ook in transparante uitvoering.

Extra informatie



Lees voor gebruik eerst de gebruiksaanwijzing van de fabrikant



Ileostomie 1-delig / Profile / Manuka honing

1



Indicatie

Parastomale hernia of oneffenheden rondom de stoma.

2



Vorbereiden

Zorg ervoor dat alle benodigde materialen klaarliggen, zoals een mal, een schaar, een pen, een afvalzakje, vochtige en droge gazen en stomamateriaal.

3



Knip indien nodig de huidplaat op maat. Rol de sluiting van het zakje op tot aan het klittenband en wrijf het aan.

4



Verwarm de huidplaat indien nodig door deze bijvoorbeeld onder de kleding te houden.

5



Verwijderen en schoonmaken

De easy2peel™ tab biedt een beginnetje om de huidplaat gemakkelijk te verwijderen zonder dat de huid hierbij wordt aangetast.

6



Ondersteun de huid en duw de huid los van de huidplaat met een vochtig gaasje.

7



Reinig de huid en de stoma met lauw water en dep deze daarna droog.

8



Aanbrengen

Verwijder de folie aan de achterzijde van de huidplaat.



Breng de huidplaat aan over de stoma op de huid en houd hierbij de huid indien nodig gestrekt.



Breng vervolgens de gehele huidplaat aan op de huid.



Wrijf de huidplaat zorgvuldig aan op de huid, te beginnen rondom de stoma.



Wrijf vervolgens de buitenranden aan.



Via het kijkvenster kan eventueel gecontroleerd worden of het stomazakje goed op zijn plaats zit.



Tip
Indien de geïntegreerde oogjes (voor het dragen van een gordel) niet nodig zijn, knip deze dan af voor het aanbrengen.



Legen
Gecontroleerd legen met het lipje.

Ileostomie 1-delig / Profile / Manuka honing

Product	Maat	Per doos	Mini Beige	Midi Beige	Maxi Beige
Aurum Profile plateau Small	13 mm	10	MHCDS413 (tot 25 mm)	MHCDS513 (tot 25 mm)	MHCDS913 (tot 25 mm)
	19 mm	10	-	MHCDS519	MHCDS919
	22 mm	10	-	MHCDS522	MHCDS922
	25 mm	10	-	MHCDS525	MHCDS925
	Maat	Per doos	Mini Trans	Midi Trans	Maxi Trans
	13 mm	10	MHCDS613 (tot 25 mm)	MHCDS713 (tot 25 mm)	MHCDS313 (tot 25 mm)

Product	Maat	Per doos	Mini Beige	Midi Beige	Maxi Beige
Aurum Profile plateau Medium	13 mm	10	MHCDM413 (tot 35 mm)	MHCDM513 (tot 35 mm)	MHCDM913 (tot 35 mm)
	19 mm	10	-	MHCDM519	MHCDM919
	22 mm	10	-	MHCDM522	MHCDM922
	25 mm	10	-	MHCDM525	MHCDM925
	29 mm	10	-	MHCDM529	MHCDM929
	32 mm	10	-	MHCDM532	MHCDM932
	35 mm	10	-	MHCDM535	MHCDM935
	Maat	Per doos	Mini Trans	Midi Trans	Maxi Trans
	13mm	10	MHCDM613 (tot 35 mm)	MHCDM713 (tot 35 mm)	MHCDM313 (tot 35 mm)

Product	Maat	Per doos	Mini Beige	Midi Beige	Maxi Beige
Aurum Profile plateau Large	13 mm	10	-	MHC DL513 (tot 48 mm)	MHC DL913 (tot 48 mm)
	32 mm	10	-	MHC DL532	MHC DL932
	35 mm	10	-	MHC DL535	MHC DL935
	38 mm	10	-	MHC DL538	MHC DL938
	44 mm	10	-	MHC DL544	MHC DL944
	Maat	Per doos	Mini Trans	Midi Trans	Maxi Trans
	13 mm	10	-	MHC DL713 (tot 48 mm)	MHC DL313 (tot 48 mm)

Product	Maat	Per doos	Mini Beige	Midi+ Beige	Maxi+ Beige
Aurum Profile plateau Xlarge	13 mm	10	-	MHC DX813 (tot 60 mm)	MHC DX213 (tot 60 mm)
	Maat	Per doos	Mini Trans	Midi+ Trans	Maxi+ Trans
	13 mm	10	-	MHC DX113 (tot 60 mm)	MHC DX013 (tot 60 mm)

M Manuka - **H** Honing - **C** Curvex (profile) - **D** Drainable - **L** Large (plateaumaat) -
5 Midi Beige (maat en kleur zakje) - **13** 13 mm (stansmaat)



Product	Per doos	Art. code
Gordel standaard 120 cm	1	XBLTS01
Gordel lang 145 cm	1	XBLTL01



ISS01/202112