



Aurum Profile
met **Manuka Honing**



**Veelzijdige probleemoplosser bij oneffenheden
en parastomale hernia's**

1-delig Aurum® Profile

Colostomie



- ✓ Met Manuka honing
- ✓ Inclusief geïntegreerde oogjes (voor het dragen van een gordel)
- ✓ Voorzien van een kijkvenster
- ✓ Het Dual-Carb® 2 is een speciaal samengesteld koolstoffilter, ontworpen om geur te absorberen en gas door het filter te laten stromen om kans op ballooning te verkleinen
- ✓ Easy2peel™ tab voor eenvoudig verwijderen van de huidplaat
- ✓ Sneldrogend en waterafstotend tissue




Productomschrijving

Verkrijgbaar in 4 plateaumaten

PLATEAUMAAT Small (13 mm t/m 25 mm)

Verkrijgbaar in de volgende maten zakjes:

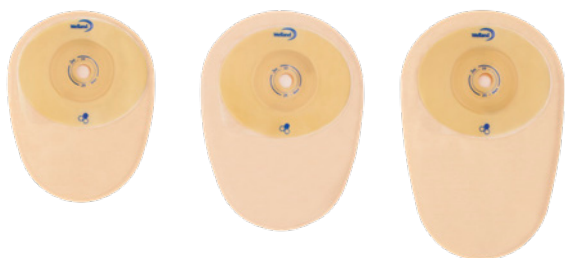


Mini

Midi

Maxi

PLATEAUMAAT Medium (13 mm t/m 35 mm)

Verkrijgbaar in de volgende maten zakjes:

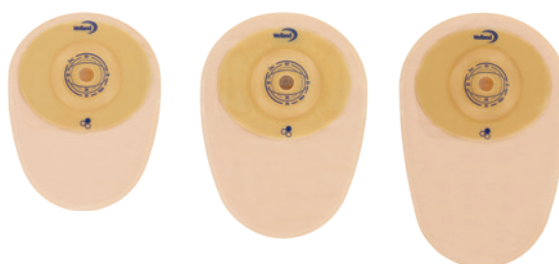

Mini

Midi

Maxi

PLATEAUMAAT Large (13 mm t/m 48 mm)

Verkrijgbaar in de volgende maten zakjes:




Midi

Maxi

PLATEAUMAAT Xlarge (13 mm t/m 60 mm)

Verkrijgbaar in de volgende maten zakjes:

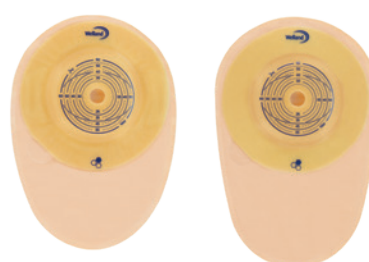

Midi+

Maxi+

i Verschillende uitknipbare varianten ook in transparante uitvoering.



Extra informatie



Lees voor gebruik eerst de gebruiksaanwijzing van de fabrikant



Colostomie 1-delig / Profile / Manuka honing

1



Indicatie

Parastomale hernia of oneffenheden rondom de stoma.

2



Vorbereiden

Zorg ervoor dat alle benodigde materialen klaarliggen, zoals een mal, een schaar, een pen, een afvalzakje, vochtige en droge gazen en stomamateriaal.

3



Knip indien nodig de huidplaat op maat.

4



Verwarm de huidplaat indien nodig door deze bijvoorbeeld onder de kleding te houden.

5



Verwijderen en schoonmaken

De easy2peel™ tab biedt een beginnetje om de huidplaat gemakkelijk te verwijderen zonder dat de huid hierbij wordt aangetast.

6



Ondersteun de huid en duw de huid los van de huidplaat met een vochtig gaasje.

7



Reinig de huid en de stoma met lauw water en dep deze daarna droog.

8



Aanbrengen

Verwijder de folie aan de achterzijde van de huidplaat.

9



Breng de huidplaat aan over de stoma op de huid en houd hierbij de huid indien nodig gestrekt.

10



Breng vervolgens de gehele huidplaat aan op de huid.

11



Wrijf de huidplaat zorgvuldig aan op de huid, te beginnen rondom de stoma.

12



Wrijf vervolgens de buitenranden aan.

13



Via het kijkvenster kan eventueel gecontroleerd worden of het stomazakje goed op zijn plaats zit.

14



Tip
Indien de geïntegreerde oogjes (voor het dragen van een gordel) niet nodig zijn, knip deze dan af voor het aanbrengen.

Colostomie 1-delig / Profile / Manuka honing

Product	Maat	Per doos	Mini Beige	Midi Beige	Maxi Beige
Aurum Profile plateau Small	13mm	10	MHCCS413 (tot 25 mm)	MHCCS513 (tot 25 mm)	MHCCS913 (tot 25 mm)
	19 mm	10	-	MHCCS519	MHCCS919
	22 mm	10	-	MHCCS522	MHCCS922
	25 mm	10	-	MHCCS525	MHCCS925
	Maat	Per doos	Mini Trans	Midi Trans	Maxi Trans
	13mm	10	MHCCS613 (tot 25 mm)	MHCCS713 (tot 25 mm)	MHCCS313 (tot 25 mm)

Product	Maat	Per doos	Mini Beige	Midi Beige	Maxi Beige
Aurum Profile plateau Medium	13 mm	10	MHCCM413 (tot 35 mm)	MHCCM513 (tot 35 mm)	MHCCM913 (tot 35 mm)
	19 mm	10	-	MHCCM519	MHCCM919
	22 mm	10	-	MHCCM522	MHCCM922
	25 mm	10	-	MHCCM525	MHCCM925
	29 mm	10	-	MHCCM529	MHCCM929
	32 mm	10	-	MHCCM532	MHCCM932
	35 mm	10	-	MHCCM535	MHCCM935
	Maat	Per doos	Mini Trans	Midi Trans	Maxi Trans
	13 mm	10	MHCCM613 (tot 35 mm)	MHCCM713 (tot 35 mm)	MHCCM313 (tot 35 mm)

Product	Maat	Per doos	Mini Beige	Midi Beige	Maxi Beige
Aurum Profile plateau Large	13 mm	10	-	MHCCL513 (tot 48 mm)	MHCCL913 (tot 48 mm)
	32 mm	10	-	MHCCL532	MHCCL932
	35 mm	10	-	MHCCL535	MHCCL935
	38 mm	10	-	MHCCL538	MHCCL938
	44 mm	10	-	MHCCL544	MHCCL944
	Maat	Per doos	Mini Trans	Midi Trans	Maxi Trans
	13 mm	10	-	MHCCL713 (tot 48 mm)	MHCCL313 (tot 48 mm)

Product	Maat	Per doos	Mini Beige	Midi+ Beige	Maxi+ Beige
Aurum Profile plateau Xlarge	13 mm	10	-	MHCCX813 (tot 60 mm)	MHCCX213 (tot 60 mm)
	Maat	Per doos	Mini Trans	Midi+ Trans	Maxi+ Trans
	13 mm	10	-	MHCCX113 (tot 60 mm)	MHCCX013 (tot 60 mm)

M Manuka - **H** Honing - **C** Curvex (Profile) - **C** Closed - **L** Large (plateaumaat) - **5** Midi Beige (maat en kleur zakje) - **13** 13 mm (stansmaat)



Product	Per doos	Art. code
Gordel standaard 120 cm	1	XBLTS01
Gordel lang 145 cm	1	XBLTL01



ISS01/202112