



1-delig doorspoelbaar systeem Aurum® Xtra Colostomie



Aurum 
met Manuka Honing

Voor stoma's die boven huidniveau liggen

1-delig doorspoelbaar systeem

Aurum[®] Xtra

Colostomie



- ✓ Deze doorspoelbare colostomiezakjes kunnen helpen om weer een gevoel te krijgen van een normaal toilet bezoek
- ✓ Met Manuka honing
- ✓ Het Dual-Carb[®] 2 is een speciaal samengesteld koolstoffilter, ontworpen om geur te absorberen en gas door het filter te laten stromen om kans op ballooning te verkleinen
- ✓ Easy2peel[™] tab voor eenvoudig verwijderen van de huidplaat
- ✓ Sneldrogend en waterafstotend tissue



Productomschrijving

Verkrijgbaar in 3 inhoudsmaten

INHOUDSMAAT

Mini uitknipbaar (tot 50 mm)



Mini

INHOUDSMAAT

Midi uitknipbaar (tot 50 mm)



Midi

INHOUDSMAAT

Maxi uitknipbaar (tot 50 mm)



Maxi

Met toiletdoorspoelbaar binnenzakje en huidplaat



Extra informatie



Lees voor gebruik eerst de gebruiksaanwijzing van de fabrikant



Colostomie 1-delig / Aurum Xtra / Manuka honing


1



Voorbereiden

Zorg ervoor dat alle benodigde materialen klaarliggen, zoals een mal, een schaar, een pen, vochtige en droge gazen en/of toiletpapier en stomamateriaal.

2

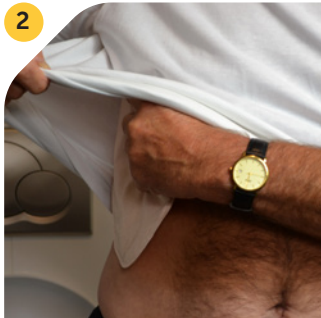

Verwarm de huidplaat door deze bijvoorbeeld onder de kleding te houden.

3



Verwijderen en schoonmaken

Ondersteun de huid en duw de huid los van de huidplaat met een vochtig gaasje of toiletpapier.

4



Reinig de huid en de stoma met lauw water en dep deze daarna droog.

5



Aanbrengen

Verwijder de folie aan de achterzijde van de huidplaat.

6



Methode 1

Vouw de huidplaat om vanaf de onderste rand van de opening. Strek, indien nodig, de huid boven de stoma en plaats de huidplaat onder de stoma op de huid.

7



Breng vervolgens de gehele huidplaat aan op de huid.

8



Methode 2

Breng de huidplaat aan over de stoma op de huid en houd, indien nodig, de huid gestrekt.



Breng vervolgens de gehele huidplaat aan op de huid.



Wrijf de huidplaat zorgvuldig aan op de huid, te beginnen rondom de stoma naar de buitenranden.



Doorspoelen of weggooien Methode 1
Vouw de voorkant van het buitenzakje om.



Houd de huidplaat tegen op de huid en verwijder vervolgens het buitenzakje met behulp van het witte lipje door deze van boven naar beneden te trekken.



Het buitenzakje is nu gescheiden van het binnenzakje. Deponeer deze in de afval-emmer.



Verwijder het binnenzakje tegelijkertijd met de huidplaat en duw de huid los van de huidplaat met een vochtig gaasje of toiletpapier.



Deponeer het binnenzakje en de huidplaat in het toilet met de huidplaat naar boven. Spoel vervolgens door. Let op: de huidplaat niet dubbelvouwen.



Methode 2
Scheid het binnenzakje van de huidplaat. Vouw de voorkant van het buitenzakje om.



Houd de huidplaat tegen op de huid en verwijder vervolgens het binnenzakje met behulp van het witte lipje door deze van boven naar beneden te trekken. Deponeer het binnenzakje in het toilet. Spoel vervolgens door.



Verwijder tenslotte de huidplaat. Duw de huid los van de huidplaat met een vochtig gaasje of toiletpapier. Deponeer de huidplaat en het buitenzakje in de afval-emmer. De huidplaat kan ook worden doorspoeld als alternatief voor het legen in de afval-emmer.



Product	Maat	Per doos	Mini Beige	Midi Beige	Maxi Beige
Aurum Xtra	19 mm	30	MHFS519	MHFM519	MHFL519
	22 mm	30	MHFS522	MHFM522	MHFL522
	25 mm	30	MHFS525	MHFM525	MHFL525
	29 mm	30	MHFS529	MHFM529	MHFL529
	32 mm	30	MHFS532	MHFM532	MHFL532
	35 mm	30	MHFS535	MHFM535	MHFL535
	38 mm	30	MHFS538	MHFM538	MHFL538
	44 mm	30	MHFS544	MHFM544	MHFL544

M Manuka - **H** Honing - **F** Flushable - **M** Midi (maat zakje) - **5** Beige - **19** 19 mm (stansmaat)



ISS01/202110