



Aurum
met Manuka Honing

Voor stoma's die boven huidniveau liggen

1-delig Aurum®

Colostomie



- ✓ Met Manuka honing
- ✓ Voorzien van een kijkvenster
- ✓ Het Dual-Carb® 2 is een speciaal samengesteld koolstoffilter, ontworpen om geur te absorberen en gas door het filter te laten stromen om kans op ballooning te verkleinen
- ✓ Easy2peel™ tab voor eenvoudig verwijderen van de huidplaat
- ✓ Sneldrogend en waterafstotend tissue



Productomschrijving

Verkrijgbaar in 3 inhoudsmaten

INHOUDSMAAT


Mini uitknipbaar (tot 50 mm bij 70 mm)



Mini

INHOUDSMAAT

Midi uitknipbaar (tot 60 mm bij 80 mm)

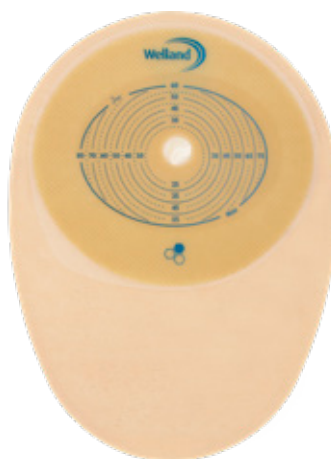

Midi

INHOUDSMAAT

Maxi uitknipbaar (tot 60 mm bij 80 mm)



Maxi

STOMACAP

(tot 40 mm bij 50 mm) of stansmaat 35 mm



i Mini, midi en maxi zakjes: uitknipbare maten tevens verkrijgbaar in transparante versie

Extra informatie



Lees voor gebruik eerst de gebruiksaanwijzing van de fabrikant



Colostomie 1-delig / Manuka honing

1



Voorbereiden


Zorg ervoor dat alle benodigde materialen klaarliggen, zoals een mal, een schaar, een pen, vochtige en droge gazen en stomamateriaal.

2



Verwarm de huidplaat door deze bijvoorbeeld onder de kleding te houden.

3

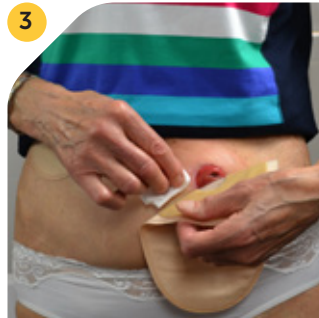

Verwijderen en schoonmaken

Ondersteun de huid en duw de huid los van de huidplaat met een vochtig gaasje.

4



Reinig de huid en de stoma met lauw water en dep deze daarna droog.

5



Aanbrengen

Verwijder de folie aan de achterzijde van de huidplaat.

6



Methode 1

Vouw de huidplaat om vanaf de onderste rand van de opening. Strek, indien nodig, de huid boven de stoma en plaats de huidplaat onder de stoma op de huid.

7



Breng vervolgens de gehele huidplaat aan op de huid.

8



Methode 2

Breng de huidplaat aan over de stoma op de huid en houd, indien nodig, de huid gestrekt.

9



Breng vervolgens de gehele huidplaat aan op de huid.

10



Wrijf de huidplaat zorgvuldig aan op de huid, te beginnen rondom de stoma naar de buitenranden.

11



Via het kijkvenster kan eventueel gecontroleerd worden of het stomazakje goed op zijn plaats zit.



Product	Maat	Per doos	Mini Beige	Midi Beige	Maxi Beige
Aurum	13 mm	30	MHCS513 (tot 50 mm bij 70 mm)	MHCM513 (tot 60 mm bij 80 mm)	MHCL513 (tot 60 mm bij 80 mm)
	19 mm	30	MHCS519	MHCM519	MHCL519
	22 mm	30	MHCS522	MHCM522	MHCL522
	25 mm	30	MHCS525	MHCM525	MHCL525
	29 mm	30	MHCS529	MHCM529	MHCL529
	32 mm	30	MHCS532	MHCM532	MHCL532
	35 mm	30	MHCS535	MHCM535	MHCL535
	38 mm	30	MHCS538	MHCM538	MHCL538
	44 mm	30	MHCS544	MHCM544	MHCL544
	Maat	Per doos	Mini Trans	Midi Trans	Maxi Trans
	13 mm	30	MHCS713 (tot 50 mm bij 70 mm)	MHCM713 (tot 60 mm bij 80 mm)	MHCL713 (tot 60 mm bij 80 mm)

Product	Maat	Per doos	Cap Beige
Stomacap	13 mm	30	MHSS513 (tot 40 mm bij 50 mm)
	35 mm	30	MHSS535

M Manuka - **H** Honing - **C** Closed - **L** Maxi (maat zakje) - **5** Beige - **13** 13 mm (stansmaat)



ISS01/202110