



Aurum 
met **Manuka Honing**

Voor stoma's die boven huidniveau liggen

1-delig **Aurum®** *Urostomie*



- ✓ Met Manuka honing
- ✓ Voorzien van een kijkvenster
- ✓ Zacht tapkraantje en tappocket
- ✓ Easy2peel™ tab voor eenvoudig verwijderen van de huidplaat
- ✓ Voorzien van terugslagventiel waardoor urine niet terug kan stromen
- ✓ Sneldrogend en waterafstotend tissue



Productomschrijving

Verkrijgbaar in 2 inhoudsmaten

INHOUDSMAAT


Midi uitknipbaar (tot 55 mm)



Midi

INHOUDSMAAT

Maxi uitknipbaar (tot 55 mm)

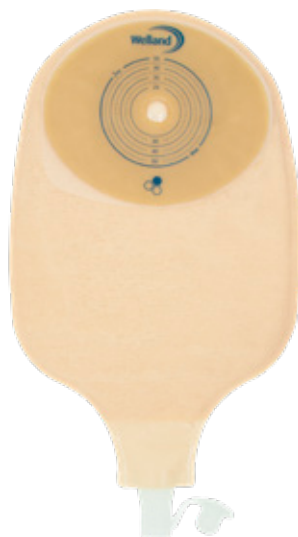

Maxi

i Midi en Maxi zakjes: uitknipbare maten en stansmaten tevens verkrijgbaar in transparante versie

Extra informatie

 Lees voor gebruik eerst de gebruiksaanwijzing van de fabrikant



Urostomie 1-delig / Manuka honing



Voorbereiden

Zorg ervoor dat alle benodigde materialen klaarliggen, zoals een mal, een schaar, een pen, vochtige en droge gazen en stomamateriaal.



Verwarm de huidplaat door deze bijvoorbeeld onder de kleding te houden.



Verwijderen en schoonmaken

Ondersteun de huid en duw de huid los van de huidplaat met een vochtig gaasje.




Reinig de huid en de stoma met lauw water en dep deze daarna droog.



Aanbrengen

Verwijder de folie aan de achterzijde van de huidplaat.

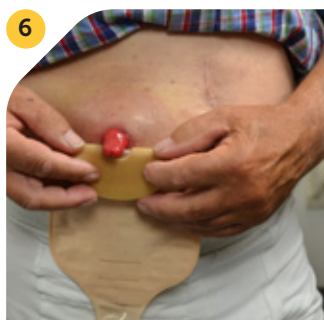


Methode 1

Vouw de huidplaat om vanaf de onderste rand van de opening. Strek de huid, indien nodig, boven de stoma en plaats de huidplaat onder de stoma op de huid.



Breng vervolgens de gehele huidplaat aan op de huid.

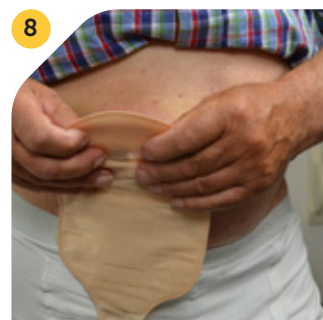

Methode 2

Breng de huidplaat aan over de stoma op de huid en houd, indien nodig, de huid gestrekt.



Breng vervolgens de gehele huidplaat aan op de huid.



Wrijf de huidplaat zorgvuldig aan op de huid, te beginnen rondom de stoma naar de buitenranden.



Via het kijkvenster kan eventueel gecontroleerd worden of het stomazakje goed op zijn plaats zit.



Na het legen kan het kraantje opgevouwen worden in de tappocket. Dit zorgt voor een optimaal draagcomfort.



Gebruik anti-twiststrip (voor de nacht)

Verwijder de beschermfolie van het stripje. Plak de antitwiststrip net boven het kraantje. Vouw tenslotte de anti-twiststrip om.



Product	Maat	Per doos	Midi Beige	Maxi Beige	Midi Trans	Maxi Trans
Aurum	13 mm	10	MHUM513 (tot 55 mm)	MHUL513 (tot 55 mm)	MHUM713 (tot 55 mm)	MHUL713 (tot 55 mm)
	19 mm	10	MHUM519	MHUL519	MHUM719	MHUL719
	22 mm	10	MHUM522	MHUL522	MHUM722	MHUL722
	25 mm	10	MHUM525	MHUL525	MHUM725	MHUL725
	29 mm	10	MHUM529	MHUL529	MHUM729	MHUL729
	32 mm	10	MHUM532	MHUL532	MHUM732	MHUL732
	35 mm	10	MHUM535	MHUL535	MHUM735	MHUL735
	38 mm	10	MHUM538	MHUL538	MHUM738	MHUL738

M Manuka - **H** Honing - **U** Uro - **L** Maxi (maat zakje) - **5** Beige - **13** 13 mm (stansmaat)



ISS01/202110