



Aurum[®] Convex Colostomie

2-delig



Aurum2 
met Manuka Honing



Veelzijdige probleemoplosser voor een lekvrije hechting

2-delig Aurum[®] Convex

Colostomie

Aurum2
met Manuka Honing



- ✓ Met Manuka honing
- ✓ Inclusief geïntegreerde oogjes (voor het dragen van een gordel)
- ✓ Voorzien van een kijkvenster
- ✓ Het Dual-Carb[®] 2 is een speciaal samengesteld koolstoffilter, ontworpen om geur te absorberen en gas door het filter te laten stromen om kans op ballooning te verkleinen
- ✓ Easy2peel[™] tab voor eenvoudig verwijderen van de huidplaat
- ✓ Sneldrogend en waterafstotend tissue



Productomschrijving

Verkrijgbaar in 3 ringmaten

RINGMAAT

45 mm (13 mm t/m 25 mm)

Verkrijgbaar in de volgende maten zakjes:



Mini

Midi

Maxi

RINGMAAT

55 mm (13 mm t/m 35 mm)

Verkrijgbaar in de volgende maten zakjes:



Mini

Midi

Maxi

RINGMAAT

70 mm (13 mm t/m 48 mm)

Verkrijgbaar in de volgende maten zakjes:



Midi

Maxi



Extra informatie

 Lees voor gebruik eerst de gebruiksaanwijzing van de fabrikant



Colostomie 2-delig / Convex / Manuka honing



Indicatie

Stoma trekt zich regelmatig terug tot op of onder huidniveau.




Voorbereiden

Zorg ervoor dat alle benodigde materialen klaarliggen, zoals een mal, een schaar, een pen, vochtige en droge gazen en stomamateriaal.



Knip indien nodig de huidplaat op maat.

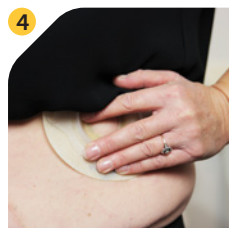

Verwarm de huidplaat indien nodig door deze bijvoorbeeld onder de kleding te houden.



Verwijderen en schoonmaken

Ondersteun de huid en duw de huid los van de huidplaat met een vochtig gaasje.




Reinig de huid en de stoma met lauw water en dep deze daarna droog.



Aanbrengen

Verwijder de folie aan de achterzijde van de huidplaat. Aan de bovenzijde van de huidplaat zit de Easy2peel™ tab (boven het Welland logo).

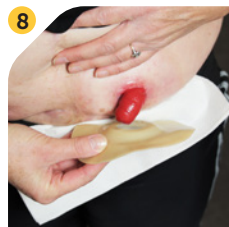

Breng de huidplaat aan over de stoma op de huid en houd hierbij de huid indien nodig gestrekt.



9

Wrijf de huidplaat rondom de stoma goed aan op de huid, te beginnen rondom de stoma naar de buitenranden.



10

Wrijf vervolgens de buitenranden aan.



11

Plaats het stomazakje aan de onderzijde tegen de ring. **Let op: Het blauw-witte beschermfolie van het zakje in dit stadium nog niet verwijderen!**



12

Breng geleidelijk het stomazakje van beneden naar boven om de ring aan.



13

Wrijf het stomazakje rondom de ring aan.



14

Pak vervolgens een van de blauw-witte lipjes van de beschermfolie en trek de folie rondom de huidplaat naar beneden. Herhaal dit aan de andere kant.



15

Verwijderen stomazakje
Ondersteun de huidplaat en pak het stomazakje bij het geribbelde lipje.



16

Rol het stomazakje naar de onderzijde van de huidplaat. Zorg ervoor dat dit een naar beneden gerichte beweging is. Op deze wijze komt het stomazakje makkelijk los.



17

Haal voor het aanbrengen de blauw-witte lipjes van elkaar zodat deze makkelijker open gaan.



18

Tip
Indien de geïntegreerde oogjes (voor het dragen van een gordel) niet nodig zijn, knip deze dan af voor het aanbrengen.



Product	Maat	Per doos	Mini Beige	Midi Beige	Maxi Beige
Aurum 2-delig Zakje	45 mm	30	XMH2C445	XMH2C545	XMH2C145
	55 mm	30	XMH2C455	XMH2C555	XMH2C155
	70 mm	10	-	XMH2C570	XMH2C170

X Export - **M** Manuka - **H** Honing - **2** 2-delig - **C** Closed - **4** Mini (maat zakje) -
45 45 mm (ringmaat)

Product	Maat	Per doos	Huidplaat 45 mm	Huidplaat 55 mm	Huidplaat 70 mm
Aurum Convex 2-delig Huidplaat	13 mm	5	XMH2NF413 (tot 25 mm)	XMH2NF513 (tot 35 mm)	XMH2NF713 (tot 48 mm)
	19 mm	5	XMH2NF419	-	-
	22 mm	5	XMH2NF422	-	-
	25 mm	5	XMH2NF425	XMH2NF525	-
	29 mm	5	-	XMH2NF529	-
	32 mm	5	-	XMH2NF532	-
	35 mm	5	-	XMH2NF535	-

X Export - **M** Manuka - **H** Honing - **2** 2-delig - **N** Convex - **F** Flange (huidplaat) -
4 45 (ringmaat) - **13** 13 mm (stansmaat)



Product	Per doos	Art. code
Gordel standaard 120 cm	1	XBLTS01
Gordel lang 145 cm	1	XBLTL01



Aurum2 
met Manuka Honing

ISS01/202112