



Aurum2 
met Manuka Honing

Veelzijdige probleemoplosser voor een lekvrije hechting

2-delig Aurum[®] Convex

Ileostomie

Aurum2[®]
met Manuka Honing



- ✓ Met Manuka honing
- ✓ Inclusief geïntegreerde oogjes (voor het dragen van een gordel)
- ✓ Voorzien van een kijkvenster
- ✓ Dual-Carb[®]i filter heeft een groot oppervlak van het koolstoffilter, dat ervoor zorgt dat de lucht vrij kan stromen door het filter en geurtjes worden geëlimineerd. Het PTFE-membraan stoot vloeibare en olieachtige stoffen af om de kans op lekkage te verkleinen
- ✓ Gemakkelijk en gecontroleerd legen met een lipje
- ✓ Easy2peel[™] tab voor eenvoudig verwijderen van de huidplaat
- ✓ Sneldrogend en waterafstotend tissue



Productomschrijving

Verkrijgbaar in 3 ringmaten

RINGMAAT

45 mm (13 t/m 25 mm)

Verkrijgbaar in de volgende maten zakjes:



RINGMAAT

55 mm (13 mm t/m 35 mm)

Verkrijgbaar in de volgende maten zakjes:



RINGMAAT

70 mm (13 mm t/m 48 mm)

Verkrijgbaar in de volgende maten zakjes:



Extra informatie



Lees voor gebruik eerst de gebruiksaanwijzing van de fabrikant



Ileostomie 2-delig / Convex / Manuka honing



1

Indicatie

Stoma trekt zich regelmatig terug tot op of onder huid-niveau.



2


Voorbereiden

Zorg ervoor dat alle benodigde materialen klaarliggen, zoals een mal, een schaar, een pen, vochtige en droge gazen en stomamateriaal.



3

Knip indien nodig de huidplaat op maat. Rol de sluiting van het zakje op tot aan het klittenband en wrijf het aan.

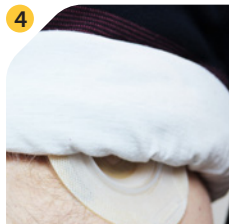

4

Verwarm de huidplaat indien nodig door deze bijvoorbeeld onder de kleding te houden.



5

Verwijderen en schoonmaken

Ondersteun de huid en duw de huid los van de huidplaat met een vochtig gaasje.



6

Reinig de huid en de stoma met lauw water en dep deze daarna droog.



7

Aanbrengen

Verwijder de folie aan de achterzijde van de huidplaat. Aan de bovenzijde van de huidplaat zit de Easy2peel™ tab (boven het Welland logo).



8

Breng de huidplaat aan over de stoma op de huid en houd hierbij de huid indien nodig gestrekt.



Wrijf de huidplaat rondom de stoma goed aan op de huid, te beginnen rondom de stoma.



Wrijf vervolgens de buitenranden aan.




Plaats het stomazakje aan de onderzijde tegen de ring. **Let op: Het blauw-witte beschermfolie van het zakje in dit stadium nog niet verwijderen!**



Breng geleidelijk het stomazakje van beneden naar boven om de ring aan.



Wrijf het stomazakje rondom de ring aan.

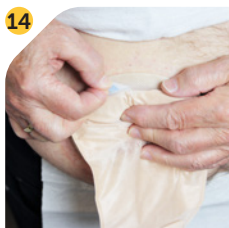


Pak vervolgens een van de blauw-witte lipjes van de beschermfolie en trek de folie rondom de huidplaat naar beneden. Herhaal dit aan de andere kant.



Verwijderen stomazakje
Ondersteun de huidplaat en pak het stomazakje bij het geribbelde lipje.



Rol het stomazakje naar de onderzijde van de huidplaat. Zorg ervoor dat dit een naar beneden gerichte beweging is. Op deze wijze laat het stomazakje makkelijk los.

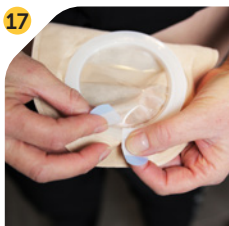

Haal voor het aanbrengen de blauw-witte lipjes van elkaar zodat deze makkelijker los komen.



Gecontroleerd legen met het lipje.



Tip
Indien de geïntegreerde oogjes (voor het dragen van een gordel) niet nodig zijn, knip deze dan af voor het aanbrengen.



Product	Maat	Per doos	Mini Beige	Midi Beige	Maxi Beige
Aurum 2-delig Zakje	45 mm	30	XMH2D445	XMH2D545	XMH2D145
	55 mm	30	XMH2D455	XMH2D555	XMH2D155
	70 mm	10	-	XMH2D570	XMH2D170

X Export - **M** Manuka - **H** Honing - **2** 2-delig - **D** Drainable - **4** Mini (maat zakje) -
45 45 mm (ringmaat)

Product	Maat	Per doos	Huidplaat 45 mm	Huidplaat 55 mm	Huidplaat 70 mm
Aurum Convex 2-delig Huidplaat	13 mm	5	XMH2NF413 (tot 25 mm)	XMH2NF513 (tot 35 mm)	XMH2NF713 (tot 48 mm)
	19 mm	5	XMH2NF419	-	-
	22 mm	5	XMH2NF422	-	-
	25 mm	5	XMH2NF425	XMH2NF525	-
	29 mm	5	-	XMH2NF529	-
	32 mm	5	-	XMH2NF532	-
	35 mm	5	-	XMH2NF535	-

X Export - **M** Manuka - **H** Honing - **2** 2-delig - **N** Convex - **F** Flange (huidplaat) -
4 45 (ringmaat) - **13** 13 mm (stansmaat)



Product	Per doos	Art. code
Gordel standaard 120 cm	1	XBLS01
Gordel lang 145 cm	1	XBTL01



Aurum2 
met Manuka Honing

ISS01/202112