



Aurum2 
met Manuka Honing

Voor stoma's die boven huidniveau liggen



- ✓ Met Manuka honing
- ✓ Inclusief geïntegreerde oogjes (voor het dragen van een gordel)
- ✓ Voorzien van een kijkvenster
- ✓ Dual-Carb[®]i filter heeft een groot oppervlak van het koolstoffilter, dat ervoor zorgt dat de lucht vrij kan stromen door het filter en geurtjes worden geëlimineerd. Het PTFE-membraan stoot vloeibare en olieachtige stoffen af om de kans op lekkage te verkleinen
- ✓ Gemakkelijk en gecontroleerd legen met een lipje
- ✓ Easy2peel[™] tab voor eenvoudig verwijderen van de huidplaat
- ✓ Sneldrogend en waterafstotend tissue



Productomschrijving

Verkrijgbaar in 3 ringmaten

RINGMAAT

45 mm (13 t/m 25 mm)

Verkrijgbaar in de volgende maten zakjes:



RINGMAAT

55 mm (13 mm t/m 35 mm)


Verkrijgbaar in de volgende maten zakjes:



RINGMAAT

70 mm (13 mm t/m 48 mm)

Verkrijgbaar in de volgende maten zakjes:

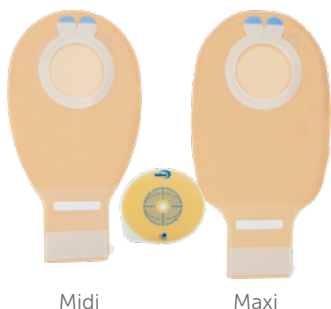


Extra informatie




Lees voor gebruik eerst de gebruiksaanwijzing van de fabrikant




Ileostomie 2-delig / Manuka honing

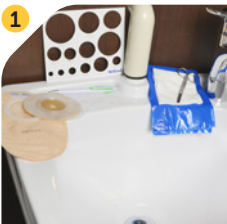

Voorbereiden:
Zorg ervoor dat alle benodigde materialen klaarliggen, zoals een mal, een schaar, een pen, vochtige en droge gazen en stomamateriaal.

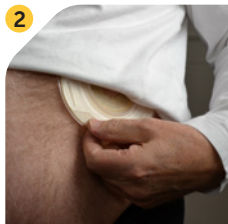

Verwijderen en schoonmaken:
Verwarm de huidplaat door deze bijvoorbeeld onder de kleding te houden.

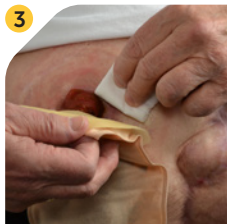


Ondersteun de huid en duw de huid los van de huidplaat.



Reinig de huid en de stoma met lauwwater en dep deze droog.



Aanbrengen:
Verwijder de folie aan de achterzijde van de huidplaat.

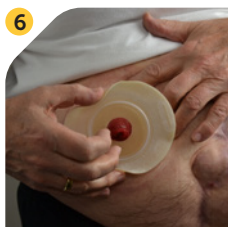

Strek met de vlakke hand de huid boven de stoma en plaats de huidplaat over de stoma.



Wrijf de huidplaat rondom de stoma goed aan op de huid, te beginnen rondom de stoma naar de buitenranden.



Plaats het stoma-zakje aan de onderzijde tegen de ring.
Let op: Het blauw-witte beschermfolie van het zakje in dit stadium nog niet verwijderen!



Breng geleidelijk het stomazakje van beneden naar boven om de ring aan.



Pak vervolgens een van de blauw-witte lipjes van de beschermfolie en trek de folie rondom de huidplaat naar beneden.



Herhaal dit aan de andere kant.



Wrijf het stomazakje rondom de ring aan.




Legen:
Gecontroleerd legen met het lipje.



Na het legen het uiteinde van het zakje oprollen.



Klittenband stevig aandrukken.

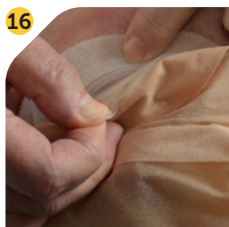

Verwijderen stomazakje:
Ondersteun de huidplaat, pak het stomazakje bij het geribbelde lipje.



Rol het stomazakje naar de onderzijde van de huidplaat. Zorg ervoor dat dit een naar beneden-gerichte beweging is. Op deze wijze laat het stomazakje makkelijk los.



Tip
Indien de geïntegreerde oogjes (voor het dragen van een gordel) niet nodig zijn, knip deze dan af voor het aanbrengen.



Product	Maat	Per doos	Mini Beige	Midi Beige	Maxi Beige
Aurum 2-delig Zakje	45 mm	30	XMH2D445	XMH2D545	XMH2D145
	55 mm	30	XMH2D455	XMH2D555	XMH2D155
	70 mm	10	-	XMH2D570	XMH2D170

X Export - **M** Manuka - **H** Honing - **2** 2-delig - **D** Drainable

4 Mini Beige (maat en kleur zakje) - **45** 45 mm (ringmaat)

Product	Maat	Per doos	Huidplaat 45 mm	Huidplaat 55 mm	Huidplaat 70 mm
Aurum 2-delig Huidplaat	13 mm	5	XMH2F413 (tot 40 mm)	XMH2F513 (tot 50 mm)	XMH2F713 (tot 65 mm)
	19 mm	5	XMH2F419	-	-
	22 mm	5	XMH2F422	-	-
	25 mm	5	XMH2F425	-	-
	29 mm	5	XMH2F429	-	-
	32 mm	5	XMH2F432	-	-
	35 mm	5	XMH2F435	-	-
	38 mm	5	XMH2F438	XMH2F538	-
	44 mm	5	-	XMH2F544	-

X Export - **M** Manuka - **H** Honing - **2** 2-delig - **F** Flange (huidplaat)

4 45 mm (ringmaat) - **13** 13 mm (stansmaat)



Product	Per doos	Art. code
Gordel standaard 120 cm	1	XBLTS01
Gordel lang 145 cm	1	XBLTL01



Aurum2 
met Manuka Honing

ISS01/202110