



Aurum2 
met Manuka Honing

Voor stoma's die boven huidniveau liggen

2-delig Aurum[®] Urostomie

Aurum2
met Manuka Honing



- ✓ Met Manuka honing
- ✓ Inclusief geïntegreerde oogjes (voor het dragen van een gordel)
- ✓ Voorzien van een kijkvenster
- ✓ Zacht tapkraantje en tappocket
- ✓ Easy2peel[™] tab voor eenvoudig verwijderen van de huidplaat
- ✓ Voorzien van terugslagventiel waardoor urine niet terug kan stromen
- ✓ Sneldrogend en waterafstotend tissue




Productomschrijving

Verkrijgbaar in 2 ringmaten

RINGMAAT

45 mm (13 mm t/m 25 mm)

Verkrijgbaar in de volgende maten zakjes:

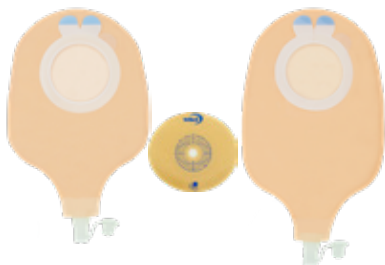


Midi

Maxi

RINGMAAT

55 mm (13 mm t/m 35 mm)

Verkrijgbaar in de volgende maten zakjes:

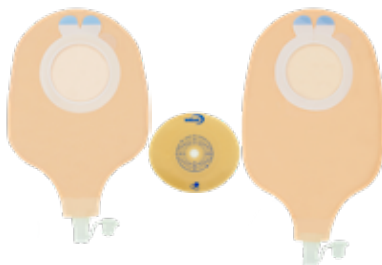

Midi

Maxi




Extra informatie



Lees voor gebruik eerst de gebruiksaanwijzing van de fabrikant




Urostomie 2-delig / Manuka honing

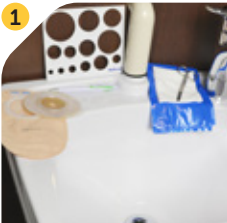

Voorbereiden:

Zorg ervoor dat alle benodigde materialen klaarliggen, zoals een mal, een schaar, een pen, vochtige en droge gazen en stomamateriaal.

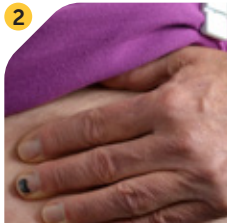

Verwijderen en schoonmaken:

Verwarm de huidplaat door deze bijvoorbeeld onder de kleding te houden.



Ondersteun de huid en duw de huid los van de huidplaat.




Reinig de huid en de stoma met lauw water en dep deze droog.



Aanbrengen:


Verwijder de folie aan de achterzijde van de huidplaat.

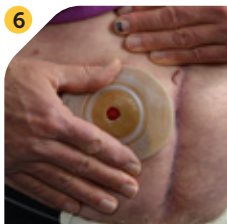


Strek met de vlakke hand de huid boven de stoma en plaats de huidplaat over de stoma.



Wrijf de huidplaat rondom de stoma goed aan op de huid, te beginnen rondom de stoma naar de buitenranden.

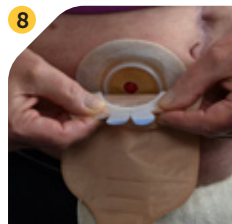


Plaats het stoma-zakje aan de onderzijde tegen de ring. **Let op: Het blauw-witte beschermfolie van het zakje in dit stadium nog niet verwijderen!**

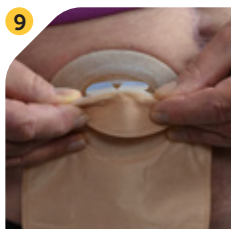


Breng geleidelijk het stomazakje van beneden naar boven om de ring aan.



Pak vervolgens een van de blauw-witte lipjes van de beschermfolie en trek de folie rondom de huidplaat naar beneden.

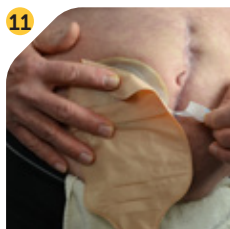


Herhaal dit aan de andere kant.

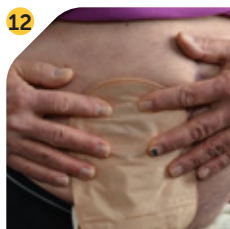

Wrijf het stomazakje rondom de ring aan.




Na het legen kan het kraantje opgevouwen worden in de tappocket. Dit zorgt voor een optimaal draagcomfort.

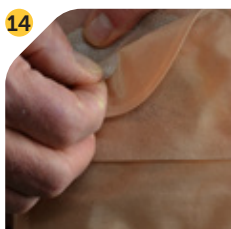

Verwijderen stomazakje:

Ondersteun de huidplaat, pak het stomazakje bij het geribbelde lipje.

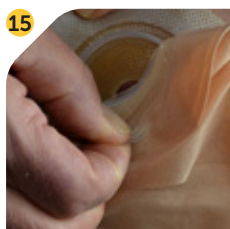


Rol het stomazakje naar de onderzijde van de huidplaat. Zorg ervoor dat dit een naar beneden-gerichte beweging is. Op deze wijze laat het stomazakje makkelijk los.



Gebruik anti-twiststrip (voor de nacht):

Verwijder de beschermfolie van het stripje. Plak de antitwiststrip net boven het kraantje. Vouw tenslotte de anti-twiststrip om.

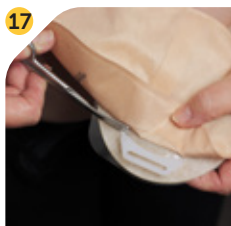

Tip

Indien de geïntegreerde oogjes (voor het dragen van een gordel) niet nodig zijn, knip deze dan af voor het aanbrengen.



Product	Maat	Per doos	Midi Beige	Maxi Beige
Aurum 2-delig Zakje	45 mm	10	XMH2U545	XMH2U145
	55 mm	10	XMH2U555	XMH2U155

X Export - **M** Manuka - **H** Honing - **2** 2-delig - **U** Uro
5 Midi Beige (maat en kleur zakje) - **45** 45 mm (ringmaat)

Product	Maat	Per doos	Huidplaat 45 mm	Huidplaat 55 mm
Aurum 2-delig Uro Huidplaat	13 mm	5	XMH2UF413 (tot 40 mm)	XMH2UF513 (tot 50 mm)
	19 mm	5	XMH2UF419	-
	22 mm	5	XMH2UF422	-
	25 mm	5	XMH2UF425	-
	29 mm	5	XMH2UF429	-
	32 mm	5	XMH2UF432	-
	35 mm	5	XMH2UF435	-
	38 mm	5	XMH2UF438	-

X Export - **M** Manuka - **H** Honing - **2** 2-delig - **U** Uro -
F Flange (huidplaat) - **4** 45 mm (ringmaat) - **13** 13 mm (stansmaat)



Product	Per doos	Art. code
Gordel standaard 120 cm	1	XBLTS01
Gordel lang 145 cm	1	XBLTL01



Aurum2 
met Manuka Honing

ISS01/202110