

1-delig Aurum® Plus Soft Convex

Ileostomie



- ✓ Met Manuka honing
- ✓ Inclusief zachte gordeloogjes
- ✓ Voorzien van kijkvenster
- ✓ Dual-Carb®i filter heeft een groot oppervlak van het koolstoffilter, dat ervoor zorgt dat de lucht door het filter kan stromen, waardoor gasvorming en geur worden geminimaliseerd. Het PTFE-membraan stoot vloeibare en olieachtige stoffen af om de kans op lekkage te verkleinen
- ✓ Het lipje, bij het openen van het zakje, helpt bij het legen
- ✓ De plusvormige huidplaat is in het midden breder voor optimale hechting
- ✓ 6 mm diepe soft convex verwerkt in een vlakke verhoging van de huidplaat



Productomschrijving

Verkrijgbaar in 4 Soft Convex plateaumaten

PLATEAUMAAT **Small (13 mm t/m 25 mm)**

Verkrijgbaar in zwart en zand in de maten
midi en maxi.



PLATEAUMAAT **Medium (13 mm t/m 35 mm)**

Verkrijgbaar in zwart en zand in de maten
midi en maxi.



PLATEAUMAAT **Large (13 mm t/m 48 mm)**

Verkrijgbaar in zwart en zand in de maten
midi en maxi.



PLATEAUMAAT **Xlarge (13 mm t/m 60 mm)**

Verkrijgbaar in zwart en zand in de maten
midi+ en maxi+.



Extra informatie



Lees voor gebruik eerst de gebruiksaanwijzing van de fabrikant



Ileostomie 1-delig / Soft Convex / Manuka honing

1



Vorbereiden

Zorg ervoor dat alle benodigde materialen klaarliggen, zoals een mal, een schaar, een pen, vochtige en droge gazen en stomamateriaal. Knip indien nodig de huidplaat op maat.

2



Verwijderen en schoonmaken

Ondersteun de huid en duw de huid los van de huidplaat met een vochtig gaasje.

3



Reinig de huid en de stoma met lauw water en dep deze daarna droog.

4



Aanbrengen

Let op dat de sluiting van het zakje gesloten is (rol het uiteinde van het zakje op tot aan de sluiting, daarna de sluiting stevig aandrukken). Verwijder de folie aan de achterzijde van de huidplaat.

5



Breng de huidplaat aan over de stoma op de huid en houd hierbij, indien nodig, de huid gestrekt.

6




Breng vervolgens de gehele huidplaat aan op de huid. Wrijf de huidplaat zorgvuldig aan op de huid, te beginnen rondom de stoma naar de buitenranden.

7



Via het kijkvenster kan eventueel gecontroleerd worden of het stomazakje goed op zijn plaats zit.

8

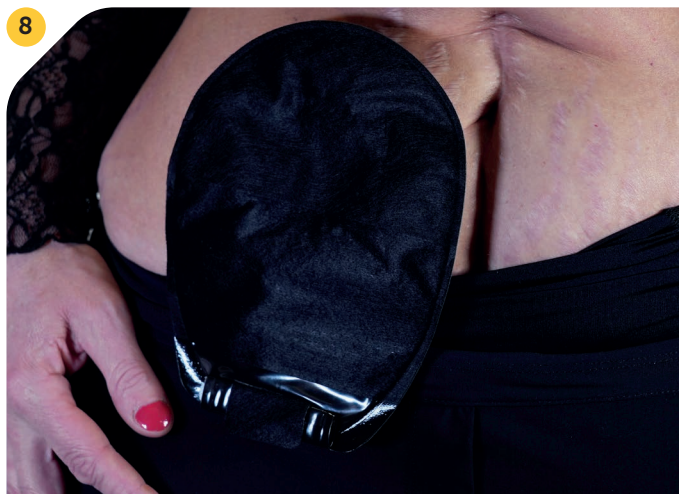



Product	Maat	Per doos	Midi Zwart	Maxi Zwart
Aurum Plus Soft Convex plateau Small	13 mm	10	X1D1N126113 (tot 25 mm)	X1D1N136113 (tot 25 mm)
	20 mm	10	X1D1N126120	X1D1N136120
	25 mm	10	X1D1N126125	X1D1N136125
Product	Maat	Per doos	Midi Zwart	Maxi Zwart
Aurum Plus Soft Convex plateau Medium	13 mm	10	X1D1N126213 (tot 35 mm)	X1D1N136213 (tot 35 mm)
	25 mm	10	X1D1N126225	X1D1N136225
	29 mm	10	X1D1N126229	X1D1N136229
	32 mm	10	X1D1N126232	X1D1N136232
	35 mm	10	X1D1N126235	X1D1N136235
Product	Maat	Per doos	Midi Zwart	Maxi Zwart
Aurum Plus Soft Convex plateau Large	13 mm	10	X1D1N126313 (tot 48 mm)	X1D1N136313 (tot 48 mm)
	35 mm	10	X1D1N126335	X1D1N136335
	38 mm	10	X1D1N126338	X1D1N136338
	44 mm	10	X1D1N126344	X1D1N136344
Product	Maat	Per doos	Midi Plus Zwart	Maxi Plus Zwart
Aurum Plus Soft Convex plateau XLarge	13 mm	10	X1D1N146413 (tot 60 mm)	X1D1N156413 (tot 60 mm)

X Export – **1** Aurum Plus – **D** Drainable – **1** 1-delig – **N** Soft Convex
12 Midi zwart (maat en kleur zakje) – **61** plateaumaat – **13** mm stansmaat

Product	Maat	Per doos	Midi Zand	Maxi Zand
Aurum Plus Soft Convex plateau Small	13 mm	10	X1D1N226113 (tot 25 mm)	X1D1N236113 (tot 25 mm)
	20 mm	10	X1D1N226120	X1D1N236120
	25 mm	10	X1D1N226125	X1D1N236125
Product	Maat	Per doos	Midi Zand	Maxi Zand
Aurum Plus Soft Convex plateau Medium	13 mm	10	X1D1N226213 (tot 35 mm)	X1D1N236213 (tot 35 mm)
	25 mm	10	X1D1N226225	X1D1N236225
	29 mm	10	X1D1N226229	X1D1N236229
	32 mm	10	X1D1N226232	X1D1N236232
	35 mm	10	X1D1N226235	X1D1N236235
Product	Maat	Per doos	Midi Zand	Maxi Zand
Aurum Plus Soft Convex plateau Large	13 mm	10	X1D1N226313 (tot 48 mm)	X1D1N236313 (tot 48 mm)
	35 mm	10	X1D1N226335	X1D1N236335
	38 mm	10	X1D1N226338	X1D1N236338
	44 mm	10	X1D1N226344	X1D1N236344
Product	Maat	Per doos	Midi Plus Zand	Maxi Plus Zand
Aurum Plus Soft Convex plateau XLarge	13 mm	10	X1D1N246413 (tot 60 mm)	X1D1N256413 (tot 60 mm)

X Export – **1** Aurum Plus – **D** Drainable – **1** 1-delig – **N** Soft Convex
22 Midi zand (maat en kleur zakje) – **61** plateaumaat – **13** mm stansmaat



Product	Per doos	Art. code
Gordel standaard 120 cm	1	XBLTS01
Gordel lang 145 cm	1	XBLTL01