

1-delig **Aurum® Plus Soft Convex**

Urostomie



- ✓ Met Manuka honing
- ✓ Inclusief zachte gordeloogjes
- ✓ Voorzien van kijkvenster
- ✓ Handige urotap voor afvoer en tappocket
- ✓ Het model van het zakje vermindert het risico dat het tapkraantje draait en de urineafvoer blokkeert
- ✓ De plusvormige huidplaat is in het midden breder voor optimale hechting
- ✓ 6 mm diepe soft convex verwerkt in een vlakke verhoging van de huidplaat



Productomschrijving

Verkrijgbaar in 3 Soft Convex plateaumaten

PLATEAUMAAT **Small (13 mm t/m 25 mm)**

Verkrijgbaar in zwart en zand in de maten
midi en maxi.



PLATEAUMAAT **Medium (13 mm t/m 35 mm)**

Verkrijgbaar in zwart en zand in de maten
midi en maxi.



PLATEAUMAAT **Large (13 mm t/m 48 mm)**

Verkrijgbaar in zwart en zand in de maten
midi en maxi.



Extra informatie



Lees voor gebruik eerst de gebruiksaanwijzing van de fabrikant



Urostomie 1-delig / Soft Convex / Manuka honing

1



Voorbereiden

Zorg ervoor dat alle benodigde materialen klaarliggen, zoals een mal, een schaar, een pen, vochtige en droge gazen en stomamateriaal. Knip indien nodig de huidplaat op maat.

2



Verwijderen en schoonmaken

Ondersteun de huid en duw de huid los van de huidplaat met een vochtig gaasje.

3



Reinig de huid en de stoma met lauw water en dep deze daarna droog.

4



Aanbrengen

Let op dat het kraantje gesloten is. Verwijder de folie aan de achterzijde van de huidplaat.

5



Strek, indien nodig, de huid boven de stoma en plaats de huidplaat onder de stoma op de huid. Breng vervolgens de gehele huidplaat aan op de huid.

6



Wrijf de huidplaat zorgvuldig aan op de huid, te beginnen rondom de stoma naar de buitenranden.

7



Via het kijkvenster kan eventueel gecontroleerd worden of het stomazakje goed op zijn plaats zit.

8



Na het legen kan het kraantje opgevouwen worden in de tappocket. Dit zorgt voor optimaal draagcomfort.

Urostomie 1-delig / Soft Convex / Manuka honing

Product	Maat	Per doos	Midi Zwart	Maxi Zwart
Aurum Plus Soft Convex plateau Small	13 mm	10	X1U1R126113 (tot 25 mm)	X1U1R136113 (tot 25 mm)
	19 mm	10	X1U1R126119	X1U1R136119
	22 mm	10	X1U1R126122	X1U1R136122
	25 mm	10	X1U1R126125	X1U1R136125
Product	Maat	Per doos	Midi Zwart	Maxi Zwart
Aurum Plus Soft Convex plateau Medium	13 mm	10	X1U1R126213 (tot 35 mm)	X1U1R136213 (tot 35 mm)
	19 mm	10	X1U1R126219	X1U1R136219
	22 mm	10	X1U1R126222	X1U1R136222
	25 mm	10	X1U1R126225	X1U1R136225
	29 mm	10	X1U1R126229	X1U1R136229
	32 mm	10	X1U1R126232	X1U1R136232
	35 mm	10	X1U1R126235	X1U1R136235
Product	Maat	Per doos	Midi Zwart	Maxi Zwart
Aurum Plus Soft Convex plateau Large	13 mm	10	X1U1R126313 (tot 48 mm)	X1U1R136313 (tot 48 mm)

X Export – **1** Aurum Plus – **U** Uro – **1** 1-delig – **R** Uro Soft Convex
12 Midi zwart (maat en kleur zakje) – **61** plateaumaat – **13** mm stansmaat



Product	Per doos	Art. code
Easiflo	10	FSA900

Product	Maat	Per doos	Midi Zand	Maxi Zand
Aurum Plus Soft Convex plateau Small	13 mm	10	X1U1R226113 (tot 25 mm)	X1U1R236113 (tot 25 mm)
	19 mm	10	X1U1R226119	X1U1R236119
	22 mm	10	X1U1R226122	X1U1R236122
	25 mm	10	X1U1R226125	X1U1R236125
Product	Maat	Per doos	Midi Zand	Maxi Zand
Aurum Plus Soft Convex plateau Medium	13 mm	10	X1U1R226213 (tot 35 mm)	X1U1R236213 (tot 35 mm)
	19 mm	10	X1U1R226219	X1U1R236219
	22 mm	10	X1U1R226222	X1U1R236222
	25 mm	10	X1U1R226225	X1U1R236225
	29 mm	10	X1U1R226229	X1U1R236229
	32 mm	10	X1U1R226232	X1U1R236232
	35 mm	10	X1U1R226235	X1U1R236235
Product	Maat	Per doos	Midi Zand	Maxi Zand
Aurum Plus Soft Convex plateau Large	13 mm	10	X1U1R226313 (tot 48 mm)	X1U1R236313 (tot 48 mm)

X Export – **1** Aurum Plus – **U** Uro – **1** 1-delig – **R** Uro Soft Convex
22 Midi zand (maat en kleur zakje) – **61** plateaumaat – **13** mm stansmaat



Product	Per doos	Art. code
Gordel standaard 120 cm	1	XBLTS01
Gordel lang 145 cm	1	XBLTL01