



Aurum 
met Manuka Honing

Voor stoma's die boven huidniveau liggen



- ✓ Met Manuka honing
- ✓ Voorzien van een kijkvenster
- ✓ Dual-Carb®i filter heeft een groot oppervlak van het koolstoffilter, dat ervoor zorgt dat de lucht vrij kan stromen door het filter en geurtjes worden geëlimineerd. Het PTFE-membraan stoot vloeibare en olieachtige stoffen af om de kans op lekkage te verkleinen
- ✓ Gemakkelijk en gecontroleerd legen met een lipje
- ✓ Easy2peel™ tab voor eenvoudig verwijderen van de huidplaat
- ✓ Sneldrogend en waterafstotend tissue



Productomschrijving

Verkrijgbaar in 3 inhoudsmaten

INHOUDSMAAT

Mini uitknipbaar (tot 50 mm bij 70 mm)



Mini

INHOUDSMAAT

Midi uitknipbaar (tot 60 mm bij 80 mm)



Midi

INHOUDSMAAT

Maxi uitknipbaar (tot 60 mm bij 80 mm)



Maxi

i Mini, midi en maxi zakjes: uitknipbare maten tevens verkrijgbaar in transparante versie

Extra informatie



Lees voor gebruik eerst de gebruiksaanwijzing van de fabrikant



Ileostomie 1-delig / Manuka honing

1



Voorbereiden

Zorg ervoor dat alle benodigde materialen klaarliggen, zoals een mal, een schaar, een pen, vochtige en droge gazen en stomamateriaal.

2



Rol de sluiting van het zakje op tot aan het klittenband en wrijf het aan.

3



Verwarm de huidplaat door deze bijvoorbeeld onder de kleding te houden.

4



Verwijderen en schoonmaken

Ondersteun de huid en duw de huid los van de huidplaat met een vochtig gaasje.

5



Reinig de huid en de stoma met lauw water en dep deze daarna droog.

6



Aanbrengen

Verwijder de folie aan de achterzijde van de huidplaat.

7



Methode 1

Vouw de huidplaat om vanaf de onderste rand van de opening. Strek de huid, indien nodig, boven de stoma en plaats de huidplaat onder de stoma op de huid.

8



Breng vervolgens de gehele huidplaat aan op de huid.



Methode 2

Breng de huidplaat aan over de stoma op de huid en houd, indien nodig, de huid gestrekt.



Breng vervolgens de gehele huidplaat aan op de huid.



Wrijf de huidplaat zorgvuldig aan op de huid, te beginnen rondom de stoma naar de buitenranden.



Via het kijkvenster kan eventueel gecontroleerd worden of het stoma-zakje goed op zijn plaats zit.



Legen

Gecontroleerd legen met het lipje.



Na het legen het uiteinde van het zakje oprollen.



Klittenband stevig aandrukken.



Product	Maat	Per doos	Mini Beige	Midi Beige	Maxi Beige
Aurum	13 mm	30	MHDS513 (tot 50 mm bij 70 mm)	MHDM513 (tot 60 mm bij 80 mm)	MHDL513 (tot 60 mm bij 80 mm)
	19 mm	30	MHDS519	MHDM519	MHDL519
	22 mm	30	MHDS522	MHDM522	MHDL522
	25 mm	30	MHDS525	MHDM525	MHDL525
	29 mm	30	MHDS529	MHDM529	MHDL529
	32 mm	30	MHDS532	MHDM532	MHDL532
	35 mm	30	MHDS535	MHDM535	MHDL535
	38 mm	30	MHDS538	MHDM538	MHDL538
	44 mm	30	MHDS544	MHDM544	MHDL544
	Maat	Per doos	Mini Trans	Midi Trans	Maxi Trans
	13 mm	30	MHDS713 (tot 50 mm bij 70 mm)	MHDM713 (tot 60 mm bij 80 mm)	MHDL713 (tot 60 mm bij 80 mm)

M Manuka - **H** Honing - **D** Drainable - **L** Maxi (maat zakje) - **5** beige - **13** 13 mm (stansmaat)



ISS01/202110