



Aurum convex
met **Manuka Honing**



Veelzijdige probleemoplosser voor een lekvrije hechting

1-delig Aurum® Convex

Urostomie



- ✓ Met Manuka honing
- ✓ Inclusief geïntegreerde oogjes (voor het dragen van een gordel)
- ✓ Voorzien van kijkvenster
- ✓ Handig tapkraantje voor afvoer en tappocket
- ✓ Easy2peel™ tab voor eenvoudig verwijderen van de huidplaat



Productomschrijving

Verkrijgbaar in 3 Convex plateaumaten

PLATEAUMAAT **Small (13 mm t/m 25 mm)**

Verkrijgbaar in de volgende maten zakjes:



Midi

Maxi

PLATEAUMAAT **Medium (13 mm t/m 35 mm)**

Verkrijgbaar in de volgende maten zakjes:



Midi

Maxi

PLATEAUMAAT **Large (13 mm t/m 48 mm)**

Verkrijgbaar in de volgende maten zakjes:



Midi

Maxi

i Verschillende uitknipbare varianten ook in transparante uitvoering.

Extra informatie



Lees voor gebruik eerst de gebruiksaanwijzing van de fabrikant



Urostomie 1-delig / Convex / Manuka honing



Indicatie

Stoma trekt zich regelmatig terug tot op of onder huidniveau.



Vorbereiden


Zorg ervoor dat alle benodigde materialen klaarliggen, zoals een mal, een schaar, een pen, vochtige en droge gazen en stomamateriaal.



Knip indien nodig de huidplaat op maat.



Verwarm de huidplaat indien nodig door deze bijvoorbeeld onder de kleding te houden.

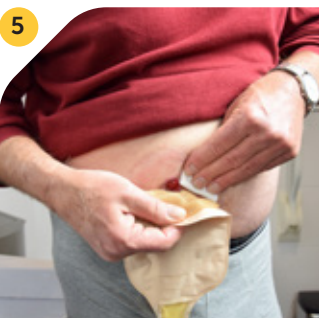

Verwijderen en schoonmaken

Ondersteun de huid en duw de huid los van de huidplaat met een vochtig gaasje.



Reinig de huid en de stoma met lauw water en dep deze daarna droog.



Aanbrengen

Verwijder de folie aan de achterzijde van de huidplaat. Let op dat het kraantje gesloten is.



Strek indien nodig de huid boven de stoma en plaats de huidplaat onder de stoma op de huid.

9




Breng vervolgens de gehele huidplaat aan op de huid.

10



Wrijf de huidplaat zorgvuldig aan op de huid, te beginnen rondom de stoma naar de buitenranden.

11

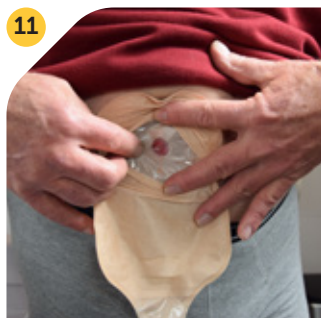

Via het kijkvenster kan eventueel gecontroleerd worden of het stoma goed op zijn plaats zit.

12



Na het legen kan het kraantje opgevouwen worden in de tappocket. Dit zorgt voor een optimaal draagcomfort.

13



Gebruik Anti-twiststrip voor de nacht: Verwijder de beschermfolie van het stripje. Plak de Anti-twiststrip net boven het kraantje. Vouw tenslotte de Anti-twiststrip om.

14



Tip
Indien de geïntegreerde oogjes (voor het dragen van een gordel) niet nodig zijn, knip deze dan af voor het aanbrengen.

Urostomie 1-delig / Convex / Manuka honing

Product	Maat	Per doos	Midi Beige	Maxi Beige
Aurum Convex plateau Small	13 mm	10	MHNUS513 (tot 25 mm)	MHNUS913 (tot 25 mm)
	19 mm	10	MHNUS519	MHNUS919
	22 mm	10	MHNUS522	MHNUS922
	25 mm	10	MHNUS525	MHNUS925
	Maat	Per doos	Midi Trans	Maxi Trans
	13 mm	10	MHNUS713 (tot 25mm)	MHNUS313 (tot 25 mm)
Product	Maat	Per doos	Midi Beige	Maxi Beige
Aurum Convex plateau Medium	13 mm	10	MHNUM513 (tot 35 mm)	MHNUM913 (tot 35 mm)
	19 mm	10	MHNUM519	MHNUM919
	22 mm	10	MHNUM522	MHNUM922
	25 mm	10	MHNUM525	MHNUM925
	29 mm	10	MHNUM529	MHNUM929
	32 mm	10	MHNUM532	MHNUM932
	35 mm	10	MHNUM535	MHNUM935
	Maat	Per doos	Midi Trans	Maxi Trans
	13 mm	10	MHNUM713 (tot 35 mm)	MHNUM313 (tot 35 mm)

Product	Maat	Per doos	Midi Beige	Maxi Beige
Aurum Convex plateau Large	13 mm	10	MHNUL513 (tot 48 mm)	MHNUL913 (tot 48 mm)
	32 mm	10	MHNUL532	MHNUL932
	35 mm	10	MHNUL535	MHNUL935
	38 mm	10	MHNUL538	MHNUL938
	Maat	Per doos	Midi Trans	Maxi Trans
	13 mm	10	MHNUL713 (tot 48 mm)	MHNUL313 (tot 48 mm)

M Manuka - **H** Honing - **N** Convex - **U** Uro - **L** Large (plateaumaat) -
5 Midi Beige (maat zakje en kleur) - **13** 13 mm (stansmaat)



Product	Per doos	Art. code
Gordel standaard 120 cm	10	XBLS01
Gordel lang 145 cm	10	XBTL01



ISS01/202110