



Aurum Profile
met **Manuka Honing**



**Veelzijdige probleemoplosser bij oneffenheden
en parastomale hernia's**

1-delig **Aurum[®] Profile**

Urostomie



- ✓ Met Manuka honing
- ✓ Inclusief geïntegreerde oogjes (voor het dragen van een gordel)
- ✓ Voorzien van een kijkvenster
- ✓ Zacht tapkraantje en tappocket
- ✓ Easy2peel™ tab voor eenvoudig verwijderen van de huidplaat
- ✓ Voorzien van terugslagventiel waardoor urine niet terug kan stromen
- ✓ Sneldrogend en waterafstotend tissue



Productomschrijving

Verkrijgbaar in 3 plateaumatens

PLATEAUMAAT **Small (13 mm t/m 25 mm)**

Verkrijgbaar in de volgende maten zakjes:



Midi

Maxi

PLATEAUMAAT **Medium (13 mm t/m 35 mm)**

Verkrijgbaar in de volgende maten zakjes:



Midi

Maxi

PLATEAUMAAT **Large (13 mm t/m 48 mm)**

Verkrijgbaar in de volgende maten zakjes:



Midi

Maxi

i Verschillende uitknipbare varianten ook in transparante uitvoering.

Extra informatie



Lees voor gebruik eerst de gebruiksaanwijzing van de fabrikant



Urostomie 1-delig / Profile / Manuka honing

1



Indicatie

Parastomale hernia of oneffenheden rondom de stoma.

2



Vorbereiden

Zorg ervoor dat alle benodigde materialen klaarliggen, zoals een mal, een schaar, een pen, een afvalzakje, vochtige en droge gazen en stomamateriaal.

3



Knip indien nodig de huidplaat op maat en sluit het kraantje.

4



Verwarm de huidplaat indien nodig door deze bijvoorbeeld onder de kleding te houden.

5



Verwijderen en schoonmaken

De easy2peel™ tab biedt een begin om de huidplaat gemakkelijk te verwijderen zonder dat de huid hierbij wordt aangetaast.

6



Ondersteun de huid en duw de huid los van de huidplaat met een vochtig gaasje.

7



Reinig de huid en de stoma met lauw water en dep deze daarna droog.

8



Aanbrengen

Verwijder de folie aan de achterzijde van de huidplaat.

9



Breng de huidplaat aan over de stoma op de huid en houd hierbij de huid indien nodig gestrekt.

10



Breng vervolgens de gehele huidplaat aan op de huid.

11



Wrijf de huidplaat zorgvuldig aan op de huid, te beginnen rondom de stoma.

12



Wrijf vervolgens de buitenranden aan.

13



Via het kijkvenster kan eventueel gecontroleerd worden of het stoma-zakje goed op zijn plaats zit.

14



Tip
Indien de geïntegreerde oogjes (voor het dragen van een gordel) niet nodig zijn, knip deze dan af voor het aanbrengen.

15



Na het legen kan het kraantje opgevouwen worden in de tap-pocket. Dit zorgt voor een optimaal draagcomfort.

16



Gebruik Anti-twiststrip voor de nacht: verwijder de beschermfolie van het stripje. Plak de Anti-twiststrip net boven het kraantje. Vouw tenslotte de Anti-twiststrip om.

Urostomie 1-delig / Profile / Manuka honing

Product	Maat	Per doos	Midi Beige	Maxi Beige
Aurum Profile plateau Small	13 mm	10	MHCUS513 (tot 25 mm)	MHCUS913 (tot 25 mm)
	19 mm	10	MHCUS519	MHCUS919
	22 mm	10	MHCUS522	MHCUS922
	25 mm	10	MHCUS525	MHCUS925
	Maat	Per doos	Midi Trans	Maxi Trans
	13 mm	10	MHCUS713 (tot 25mm)	MHCUS313 (tot 25 mm)

Product	Maat	Per doos	Midi Beige	Maxi Beige
Aurum Profile plateau Medium	13 mm	10	MHCUM513 (tot 35 mm)	MHCUM913 (tot 35 mm)
	19 mm	10	MHCUM519	MHCUM919
	22 mm	10	MHCUM522	MHCUM922
	25 mm	10	MHCUM525	MHCUM925
	29 mm	10	MHCUM529	MHCUM929
	32 mm	10	MHCUM532	MHCUM932
	35 mm	10	MHCUM535	MHCUM935
	Maat	Per doos	Midi Trans	Maxi Trans
	13 mm	10	MHCUM713 (tot 35 mm)	MHCUM313 (tot 35 mm)

Product	Maat	Per doos	Midi Beige	Maxi Beige
Aurum Profile plateau Large	13 mm	10	MHCUL513 (tot 48 mm)	MHCUL913 (tot 48 mm)
	32 mm	10	MHCUL532	MHCUL932
	35 mm	10	MHCUL535	MHCUL935
	38 mm	10	MHCUL538	MHCUL938
	Maat	Per doos	Midi Trans	Maxi Trans
	13 mm	10	MHCUL713 (tot 48 mm)	MHCUL313 (tot 48 mm)

M Manuka - **H** Honing - **C** Curvex (Profile) - **U** Uro - **L** Large (plateaumaat) -
5 Midi Beige (maat en kleur zakje) - **13** 13 mm (stansmaat)



Product	Per doos	Art. code
Gordel standaard 120 cm	1	XBLTS01
Gordel lang 145 cm	1	XBLTL01



ISS01/202112